

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия

Наименование:

Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Мультипласт»® по ТУ 9393-043-00480520-2011

Описание:

Лейкопластырь представляет собой тканевую подложку (основу), покрытую клеевым слоем. Лейкопластырь выпускается в рулонах на картонной гильзе, или в виде полоски подложки с клеевым слоем с защитным покрытием.

Состав:

Материал подложка (основа): ткань хлопчатобумажная

Клеевой слой: термоплавкий клей.

Гильза картонная

Упаковка: пачка картонная

Описание принципа действия:

Неинвазивное сцепление с поверхностью кожи с целью фиксации повязок на месте или прикрепления предметов.

Область применения:

Перевязочное медицинское изделие.

Условия применения:

В стационарных и амбулаторных лечебно-профилактических медицинских учреждениях, в полевых и домашних условиях.

Показания к применению:

Для фиксации повязок, крепления дренажных трубок, зондов, катетеров и пр.

Противопоказания:

Возможна индивидуальная непереносимость.

Способ применения.

Отрезать полоску лейкопластыря необходимого размера, клеевой стороной наложить на повязку и края полоски прижать к коже.

Возможные побочные действия при применении:

Возможны аллергические реакции в местах прикрепления. В этих случаях не рекомендуется применение лейкопластыря.

Взаимодействия с другими медицинскими изделиями:

Не использовать одновременно с другими наружными средствами на одних и тех же участках.

Указание возможности и особенностей применения для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых имеющих хронические заболевания:

Исследование применения медицинского изделия лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Мультипласт»® у людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых имеющих хронические заболевания не проводилось.

Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.

Сведения о возможном влиянии использования на способность управлять транспортными средствами, механизмами:

Исследования о возможном влиянии медицинского изделия лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Мультипласт»® на способность управлять транспортными средствами, механизмами не проводились. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.

Форма выпуска:

Лейкопластырь в рулоне упаковывают в пачки складные из картона.

Пачки помещают в ящик из гофрированного картона.

Условия хранения:

Условия хранения лейкопластыря:

-в транспортной упаковке – 2 (С) ГОСТ 15150, но при температуре от минус 20 до плюс 30 °С;

-в потребительской упаковке – хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от минус 20 до плюс 30 °С.

Условия транспортирования:

Условия транспортирования - по условиям хранения 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150, но при температуре от минус 20 до плюс 30 °С.

Срок годности:

Гарантийный срок годности - 4 года со дня изготовления. Не использовать позднее срока, указанного на упаковке.

Требования безопасности и охраны окружающей среды:

В условиях эксплуатации лейкопластырь по токсикологическим и санитарно-химическим показателям отвечает требованиям безопасности, предъявляемым к материалам, контактирующим с кожными покровами человека.

Лейкопластырь относится к горючим веществам, не взрывоопасен.

Охрана окружающей среды по ГОСТ 17.2.3.01.

При производстве лейкопластыря образующиеся отходы складываются в контейнеры и утилизируются в установленном порядке.

Порядок осуществления утилизации и уничтожения:

Использованный лейкопластырь относится к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

Неиспользованный лейкопластырь специальных мер предосторожности при уничтожении не имеет.

Производитель/организация, принимающая претензии:

ОАО «Новосибхимфарм»

630028, Россия, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 275

тел. (383) 363-32-44; факс (383) 363-32-55, e-mail: mail@nskpharm.ru